

# HELIX® GRAND MORSE®

## TÍNH ĐA NĂNG TOÀN DIỆN

Hãy tận hưởng thêm sự linh hoạt điều trị cho bệnh nhân nhằm mang lại kết quả phục hồi răng tối ưu cho tất cả các chỉ định, từ mất răng đơn lẻ đến toàn hàm. Hệ thống Helix® Grand Morse® mới cho phép lựa chọn điều trị phù hợp theo tình huống lâm sàng cụ thể, có cân nhắc đến sinh học và các nguyên tắc cơ bản của nha khoa cấy ghép.

## ĐỘ TIN CẬY CAO

### NỀN TẢNG VỮNG CHẮC VÀ CỨNG CẤP ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO SỰ THÀNH CÔNG LÂU DÀI

Giao diện implant-abutment rất quan trọng cho kết quả thành công dài hạn và thẩm mỹ. Kết nối Neodent® Grand Morse® cung cấp một sự kết hợp độc đáo dựa trên các quan điểm đã được kiểm chứng: bề mặt chuyển kết nối Neodent® Morse 16° bao gồm một khóa ngầm trong cho một kết nối mạnh mẽ và ổn định được thiết kế để đạt kết quả lâu dài.



- 1 Chuyển bề**  
Thiết kế Abutment với đường kính hẹp hơn vùng cổ implant, tuân theo quan điểm chuyển bề.
- 2 Khóa ngầm trong**  
Định vị abutment chính xác, chống xoay và dễ tháo lắp.
- 3 Kết nối sâu**  
Cho phép một diện tích tiếp xúc lớn giữa abutment và implant để phân phối tải lực tối ưu.
- 4 Kết nối thuận 16°**  
Được thiết kế để đảm bảo sự khít chặt cho kết nối kín tối ưu.

## ĐỘ THẨM MỸ CAO

### TÍNH THẨM MỸ TỰ NHIÊN TRONG ĐIỀU TRỊ TỨC THÌ

Ngày nay, bệnh nhân mong đợi cả thời gian điều trị ngắn và kết quả thẩm mỹ. Danh mục phục hình Neodent Grand Morse cung cấp tính linh hoạt để đơn giản hóa việc quản lý mô mềm tồn trọng khoảng sinh học nhằm đạt chức năng thẩm mỹ tức thì.

**CẤP ĐỘ THIẾT THEO CỦA ĐIỀU TRỊ TOÀN HÀM CỐ ĐỊNH TỨC THÌ**  
Trụ phục hình nón nhỏ Neodent® Grand Morse® Mini Conical được thiết kế để cải thiện điều trị toàn hàm.



### DANH MỤC PHỤC HÌNH TOÀN DIỆN CHO KẾT QUẢ THẨM MỸ TỐI ƯU

Screw-retained restoration	Screw or Cement-retained restoration						Cement-retained restoration	Screw-retained restoration	Overdenture	Screw-retained prosthesis			
Titanium Temporary Abutment	Pro-Peak Abutment	Titanium Base	Titanium Base C	Titanium Base AS	Titanium Base for Bridge	Titanium Block	CoCr Abutment	Anatomic Abutment	Universal Abutment	Angled Mini Conical Abutment	Novolock	Mini Conical Abutment	Micro Abutment
Temporary Single or Multiple-unit	Temporary Single-unit	Single-unit			Multiple-unit	Single or Multiple-unit	Single-unit		Multiple-unit		Single or Multiple-unit		


## ĐỘ ỔN ĐỊNH CAO

### ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO CÁC ĐIỀU TRỊ TỨC THÌ TIỀN ĐOÁN ĐƯỢC Ở MỌI LOẠI XƯƠNG

Mong muốn rút ngắn thời gian điều trị là một thách thức đáng kể cho các chuyên gia nha khoa. Hệ thống Neodent® Grand Morse® cung cấp ba thiết kế implant, tất cả đều đặc trưng bằng bề mặt ưa nước Acqua được thiết kế để tối đa hóa ổn định sơ khởi và tính tiên đoán được trong các quy trình phục hình tức thì.

### IMPLANT TỐI ƯU ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐẠT ỔN ĐỊNH SƠ KHỞI CAO

Helix® Grand Morse® là một thiết kế implant tiên tiến nhằm tối đa hóa các lựa chọn và hiệu quả điều trị ở mọi loại xương.

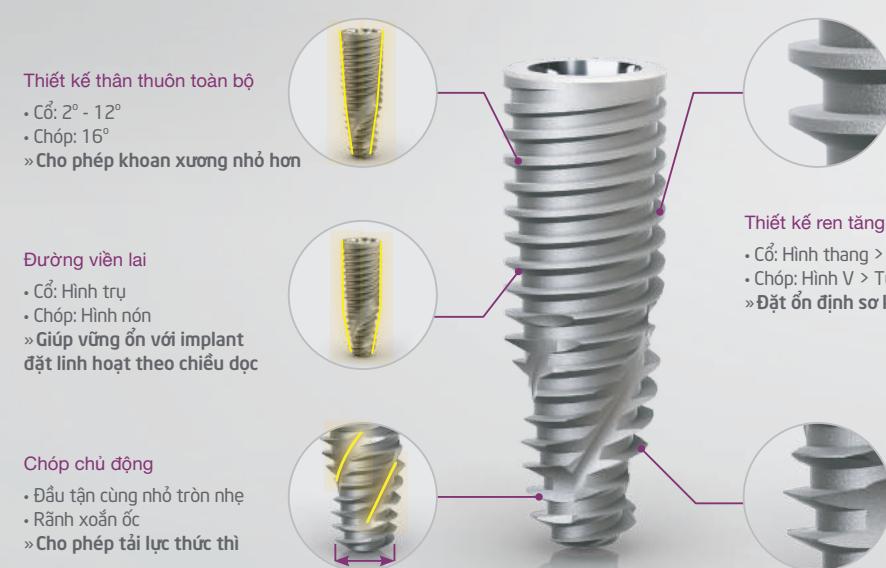


**Thiết kế thân thuận toàn bộ**  
- Góc 2° - 12°  
- Chóp 16°  
-> Cho phép khoan xương nhỏ hơn

**Đường viền lai**  
- Góc: Hình trụ  
- Chóp: Hình nón  
-> Giúp vững ổn với implant đặt linh hoạt theo chiều dọc

**Chóp chủ động**  
- Đầu tận cùng nhỏ tròn nhẹ  
- Rãnh xoắn ốc  
-> Cho phép tải lực tức thì

**Thiết kế ren tăng dần theo động lực**  
- Góc: Hình thang > nón  
- Chóp: Hình V > Tupe ren  
-> Đạt ổn định sơ khởi cao ở mọi loại xương

**BỀ MẶT ƯA NƯỚC ACQUA ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO KHẢ NĂNG TIỀN ĐOÁN CAO CỦA ĐIỀU TRỊ**  
Bề mặt ưa nước Neodent Acqua® cấp độ tiếp theo của bề mặt kiểu S.L.A thành công cao, được tối ưu để đạt được tích hợp xương thành công ngay cả trong những tình huống khó khăn với xương xốp hoặc các quy trình tức thì.

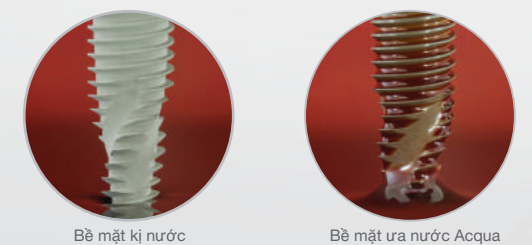

**Tinh ưa nước**  
Bề mặt ưa nước có một góc tiếp xúc thẩm ướt nhỏ hơn khi tiếp xúc với chất lỏng. Điều này cung cấp khả năng tiếp cận chất lỏng hữu cơ lớn hơn đến bề mặt implant Acqua.

## TÍNH ĐƠN GIẢN CAO

### ĐỂ SỬ DỤNG CHO KẾT QUẢ TỐT NHẤT

Điều trị implant đã trở thành một phần không thể tách rời của nha khoa lâm sàng, với ngày càng nhiều bệnh nhân tìm kiếm điều trị như vậy. Hệ thống Implant Neodent® Grand Morse® được thể kế thông minh đem lại hiệu quả và đơn giản trong mạng lưới điều trị nha khoa cho cả bước phẫu thuật và phục hình.

### MỘT KẾT NỐI PHỤC HÌNH

Tất cả implant Neodent® Grand Morse® đều có kết nối Grand Morse® độc nhất bất kể đường kính implant.



### MỘT CÂY VÁN IMPLANT

Cây ván implant Neodent® mới cho phép lấy và đặt implant dễ dàng và đáng tin cậy.



### MỘT CÂY VÁN ỐC PHỤC HÌNH

Cây ván ốc mới Neo có gắn hình sao đưa đến độ tin cậy và độ bền tương thích với tất cả trụ lành thương Neodent® Grand Morse® và các ốc phục hình.



### MỘT BỘ PHẪU THUẬT

Tất cả implant Neodent® Grand Morse® có thể được đặt bằng bộ phẫu thuật đa chức năng trên mọi loại xương.



